

Curacid® SBR – Steckbeckenreiniger

Curacid® SBR ist ein flüssiger Reiniger mit wasserenthärtender Wirkung zur Anwendung in Steckbecken - Reinigungsanlagen.

Durch seine ausgewogene Wirkungsweise werden auch Verschmutzungen, wie z. B. Salbenreste, rückstandslos entfernt.

Durch den hohen Anteil an Komplexbildnern wird ein Anlaufen der Maschinen und des Spülgutes verhindert.

Technische Daten:

Inhaltsstoffe: Alkalien, Komplexbildner (NTA-frei), Hilfsstoffe

Beschaffenheit: hellgelbe Flüssigkeit, charakteristischer Geruch

pH-Wert (1%ige Lösung): ca. 12,4

Dichte: 1,27 g/cm³

Wasserlöslichkeit:

vollständig löslich

Schaumverhalten:

nicht schäumend

Abspülbarkeit:

leicht und ohne Rückstände

Hartwasserstabilität:

geeignet für jede Wasserhärte

Anwendungsempfehlung:

Die Anwendungskonzentration von **Curacid® SBR** beträgt je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte 0,1 bis 0,5%. Die Dosierung

erfolgt direkt vom Originalgebinde mittels elektronischer Dosiergeräte.

Materialverträglichkeit:

Curacid® SBR ist geeignet zum Einsatz an allen im Klinikbereich vorkommenden Materialien.

Lagerung:

Curacid® SBR soll in geschlossenen Behältnissen zwischen +5°C und +25°C gelagert werden und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Sicherheit:

Beachten Sie bitte die R- und S- Sätze auf dem Etikett und in dem Sicherheitsdatenblatt.

Die im Umgang mit chemischen Produkten erforderlichen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.

Lieferformen

Art.-Nr.: 13101

5 Liter Kanister

Zur Beachtung:

Beim Umgang mit dem Konzentrat gem.

Gefahrstoffverordnung: Xi Reizend. Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser abspülen.