

Curacid® DR10 – Desinfektionsreiniger

Curacid® DR 10 ist ein aldehydfreier Desinfektionsreiniger. Er ermöglicht eine schonende und effiziente Flächen- und Inventardesinfektion. Für Medizinprodukte zugelassen und daher für die Reinigung in Praxen und Kliniken hervorragend geeignet. Curacid® DR 10 ist durch die sehr niedrigen Anwendungskonzentrationen sehr wirtschaftlich.

Flächen und Inventar werden material-schonend gereinigt und desinfiziert, ohne ein Reinigungsmittel der gebrauchsfertigen Lösung beizufügen.

Auch geeignet für Linoleum und PVC-Beläge.

Eigenschaften

- schnell und umfassend bakterizid inkl. TBC
- fungizid, tuberkulozid
- virusinaktivierend inkl. HBV/HIV, BVDV(HCV)+Vaccina-Viren, Noro-Viren, gemäß aktueller Empfehlung des RKI
- gute Reinigungsleistung
- gute Material- und Hautverträglichkeit
- geeignet für zentrale und dezentrale Dosieranlagen
- geeignet zur Tauchdesinfektion
- für Mischsysteme an Spülautomaten und Pflegewannen geeignet

Wirksame Bestandteile in 100 g

8,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid

2,5 g Polyhexamethylenbiguanid-hydrochlorid

chemisch-physikal. Daten (bei 20°C)

Aussehen	klare, leicht grünliche Flüssigkeit
Dichte	0,979-0,987
pH-Wert Konz.	ca. 4,0-4,5
pH-Wert 0,5 % Lsg.	ca. 7,0

Einsatzgebiete

Allgemeine Desinfektion u. a. von Stationen, Krankenzimmern, Toiletten, Betten, Steckbecken, Urinflaschen und Inventar in Krankenhäusern, Bäderabteilungen, Altenheimen und Sanatorien sowie Risikobereichen (OP-Räume und Intensivstationen).

Anwendungsempfehlungen

Bakterizid, fungizid gemäß DGHM:

1,5%	15 Minuten
1,0%	30 Minuten
0,5%	1 Stunde
0,25%	4 Stunden

Schnelldesinfektion:

8,0% 60 Sekunden

Tuberkulozid (M.Terrae):

3,0% 15 Minuten

BVDV(HCV Surrogatvirus):

0,25% 15 Minuten

Vaccina-Viren:

0,25% 15 Minuten

1,0% 30 Min. (mit Belastung)

DGHM/VAH-zertifiziert, CE 0481

Gutachten

Prof. Dr. Schubert, Frankfurt

Prof. Dr. Rudolph, Greifswald

Prof. Dr. Steinmann, Bremen

HBV/HIV+BVDV (HCV), Vaccina

Lieferformen

Art.-Nr.: 13102 1000 ml Dosierflasche

Art.-Nr.: 13101 5 Liter Kanister

Zur Beachtung:

Beim Umgang mit dem Konzentrat gem.

Gefahrstoffverordnung: Xi Reizend. Reizt die

Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände

von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den

Augen gründlich mit Wasser ausspülen und

Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut

mit viel Wasser abspülen.