

CURACID AKTIV PLUS Desinfektionstücher

Die Curacid Aktiv Plus Desinfektionstücher sind gebrauchsfertige, alkoholische Hygienetücher zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Gegenständen in Pflege, Industrie- und Lebensmittelbereichen sowie allen anderen hygienisch kritischen Bereichen. Die Tücher sind auch sehr gut gegen Noro wirksam und somit gem. RKI als begrenzt viruzid plus eingestuft. Ideal, wenn praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind und überall, wo eine rückstandsfreie Fläche nach der Desinfektion verbleiben soll. Die Wischtücher sind sofort einsatzbereit. Ein Aufsprühen der Flüssigkeit entfällt, ein gesundheitsschädlicher Sprühnebel wird nicht erzeugt.

Der Spendereimer und auch die Spenderdose sind in vielen Bereichen einsetzbar, in denen es auf ein Höchstmaß an Hygiene und Sauberkeit ankommt.

Die metallbeschichteten Beutel lassen die alkoholischen Dämpfe nicht entweichen, weswegen die Haltbarkeit enorm hoch ist. Die Rolle des Innenbeutels der Dosen hat zur leichteren Entnahme des ersten Blattes nun einen Zipfel, an dem das erste Tuch leicht herausgezogen werden kann. Sie sparen dadurch viel Mühe und Ausschuss.

Eigenschaften:

- aldehyd-, phenol-, QAV-frei
- schnell und umfassend wirksam
- wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid und mycobakterizid, inkl. MRSA
- wirksam gegen alle behüllte Viren und Vaccinia (inkl. HCV/HBV/HIV)
- wirksam gegen Adeno und Noroviren
- neutraler, angenehmer Geruch
- geprüft nach den Methoden des VAH, den EN-Normen und den Empfehlungen des RKI zur Wirksamkeit gegen Viren
- HACCP-konform
- Dermatest „sehr gut“
- gem. RKI begrenzt viruzid plus
- bis zu 90 Tage nach Anbruch haltbar

Anwendung:

Gebrauchsfertige Tücher. Die Oberfläche mit dem getränkten Tuch sorgfältig wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten.

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen und die Fläche ggf. vorreinigen. Nach Tuchentnahme Verpackung wieder gut verschließen.

Einwirkzeiten

gem. Richtlinie VAH	60 Sek.
Salmonellen	30 Sek.
Listerien	30 Sek.
MRSA	30 Sek.
Tuberkulose	60 Sek.
Adenovirus	60 Sek.
Norovirus	60 Sek.
Vacciniavirus	60 sek.

Besondere Hinweise:

Haltbarkeit nach Anbruch: Empfehlung 28 Tage für den medizinischen Bereich. Bei sorgfältiger Lagerung bis zu 90 Tage für alle anderen Bereiche haltbar.

Nur feuchte Tücher für die Desinfektion verwenden.

Nicht geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen wie z. B. Acrylglas oder Polycarbonatglas. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lieferformen:

Art. 13070 Dose, 15x18cm, 120 Blatt

Art. 13075 Eimer, 26x28cm, 100 Blatt

Art. 13076 Refill, 26x28cm, 100 Blatt

