

26.10.2023

**Produktbezeichnung:** CURACID MEDICAL PLUS  
**Anwendungsbereich:** Hygienische Flächendesinfektion  
**Bereichsempfehlung:** Medizin, Industrie, Schule+Kita, Feuerwehr, Veterinärbereich

<b>Verkaufseinheit</b>	<b>1L (rund)</b>	<b>5L</b>			
Artikelnummer	113121	113122			
EAN	4035901000251	4035901000268			
Gewicht	1,07 kg	4,90 kg			
Höhe	28 cm	25 cm			
Breite	8 cm	19 cm			
Tiefe	8 cm	15 cm			
<b>Verpackungseinheit</b>	<b>10x1L (rund)</b>				
Artikelnummer	113121				
EAN	4035901000251				
Gewicht	10,4 kg				
Höhe	29,5 cm				
Breite	24,5 cm				
Tiefe	23,0 cm				

**Eigenschaften:**

- zur schnellen Desinfektion von empfindlichen Flächen und Gegenständen
- sehr breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren (inkl. MRSA, HIV/HBV/HCV, Noro, Corona u.v.a.)
- u.a. begutachtet nach den Richtlinien des VAH
- gem. RKI-Richtlinie begrenzt viruzid PLUS
- alkoholfrei, daher sehr gute Materialverträglichkeit auch bei Kunststoffen

**Anwendungsempfehlung:** Curacid Medical Plus unverdünnt anwenden. Flächen und Gegenstände gleichmäßig benetzen und mind. 1 Minute einwirken lassen. Curacid Medical Plus ist sehr gut gegen Viren wirksam, so dass es gem. RKI als begrenzt viruzid Plus eingestuft wird.

**Wirksame Bestandteile in 100g:** 0,35g Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25g Aminopropyl-dodecylpropandiamin, 0,1g 2-Phenoxyethanol; weitere Bestandteile:  
**weitere Bestandteile:** Hilfsstoffe

**Normen und Regularien:** UFI: 7R10-90MH-V00F-24RK  
 EN 13624, EN 13727  
 VAH-Norm  
 N-84679

**Besondere Hinweise:** Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe SDB.  
 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.